


3M Ficha Técnica de Produto

Rolo de Fita Indicadora para Vapor

Multiusos 3M™ COMPLY™

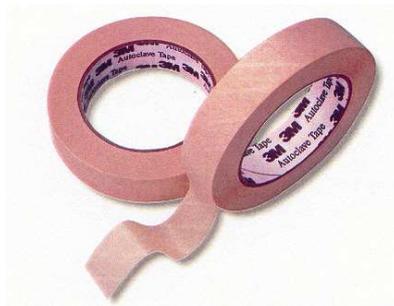

Referências: 1222-1N, 1222-6N

Descrição

A fita indicadora para Vapor 3M™ Comply™ é constituída por um adesivo, um suporte e um indicador químico.

A fita indicadora é uma fita multiusos suficientemente forte para fixar uma variedade de invólucros e fácil de remover para invólucros recicláveis.

O adesivo da fita não perde a adesividade mesmo depois de esterilizado.

Esta fita é expansível de forma a minimizar descolamentos, possui elasticidade necessária para permitir e suportar a expansão da embalagem durante o processo de esterilização devido às diferenças de pressão e está em conformidade com os requisitos de desempenho específicos e gerais para esterilização por Calor Húmido (Vapor).

Indicações de uso

- A fita indicadora foi concebida para controlar a exposição das embalagens no processo de esterilização, permitindo distinguir embalagens processadas e não processadas.
- A fita foi desenhada para fixar invólucros recicláveis e invólucros de tecido descartáveis.

- O indicador químico presente na fita muda de branco a castanho-escuro/negro ao ser submetido a um processo de esterilização por Calor Húmido (Vapor).

Armazenamento

Armazenar a fita adesiva 3M Comply em ambiente seco (50% humidade relativa) e a uma temperatura ambiente (15 - 30° C).

Validade

A fita indicadora tem um prazo de validade de 18 meses.

Normativas

A fita adesiva para Calor Húmido (Vapor) 3M Comply ref. 1222 cumpre com as normas EN ISO 11140-1.

Informação para Pedidos

Referencia	Produto	Dimensões	Rolos/ Caixa	Caixas /Embalagem
1222-6N	Fita indicadora para vapor 3M™ Comply™	19mm x 55m	24	1
1222-1N	Fita indicadora para vapor 3M™ Comply™	25mm x 55m	18	1