

APECO Meditex Francia

3 Allée des Acacias

93430 Villetaneuse

Teléfono : 01.42.35.15.95

Fax : 01.42.35.21.42

Ficha técnica e instrucciones de esterilización

Correo : meditex.france@free.fr

Le informamos que está utilizando un material de muy buena calidad y fabricado en la instrumentación dental.

Siempre utilizamos acero inoxidable GRADO AISI 410 para los materiales no cortantes.

Recomendamos esterilizar estos materiales en AUTOCLAVE por el método adecuado.

- 1) Coloque los instrumentos en el compartimento y cierre la puerta.
- 2) Evacuar todo el aire posible.
- 3) Ajuste la presión a 105 Kpa y cuando el termómetro indique una temperatura de 134°C, se inicia el proceso de esterilización.
- 4) Deje que la esterilización continúe durante 18 minutos y déjelo en el autoclave.
- 5) Deje que los instrumentos se enfríen y luego séquelos durante 15 minutos en el autoclave.
- 6) El dentista debe limpiar los restos de sangre con las soluciones recomendadas antes de reutilizar el instrumental.

Fabricante: SARL APECO MEDITEX FRANCE

Fldem Entreprises Sialkot, Pakistán 3 Allée des Acacias

93430 Villetaneus