

Protocol GO-TAPER RETRATAMENTO (retratamento)



Após abrir a câmara e localizar todos os canais, preencha a cavidade de acesso com hipoclorito de sódio.



Utilize o instrumento C1 em contacto com a gutta com leve pressão apical. Deixe-o descer alguns mm e suba escovando as paredes do canal.



Em seguida, utilize o instrumento C2, descendo no canal, sempre em contacto com a guta e com leve pressão apical.



Depois, faça o mesmo movimento com o instrumento C3.



Enxague abundantemente.



Repita a sequência começando com o instrumento C2. O instrumento C1 já não será usado nesta etapa. Avance apicalmente no canal.



Avance ainda um pouco mais apicalmente com o instrumento C3 e recomece as etapas de enxaguamentos - C2 - C3 até ao comprimento de trabalho.