



**PROTOCOLLO PREFILE**


**Com EASY-FILE FLEX :**

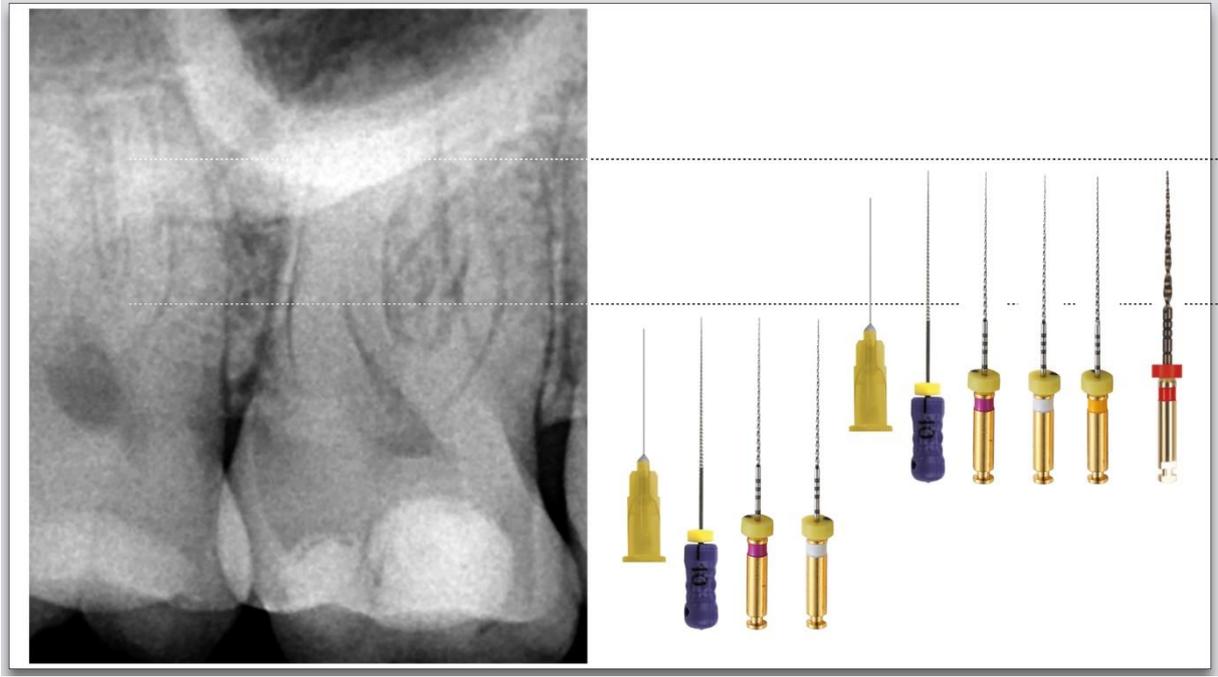


**Com REVERSO BLUE :**

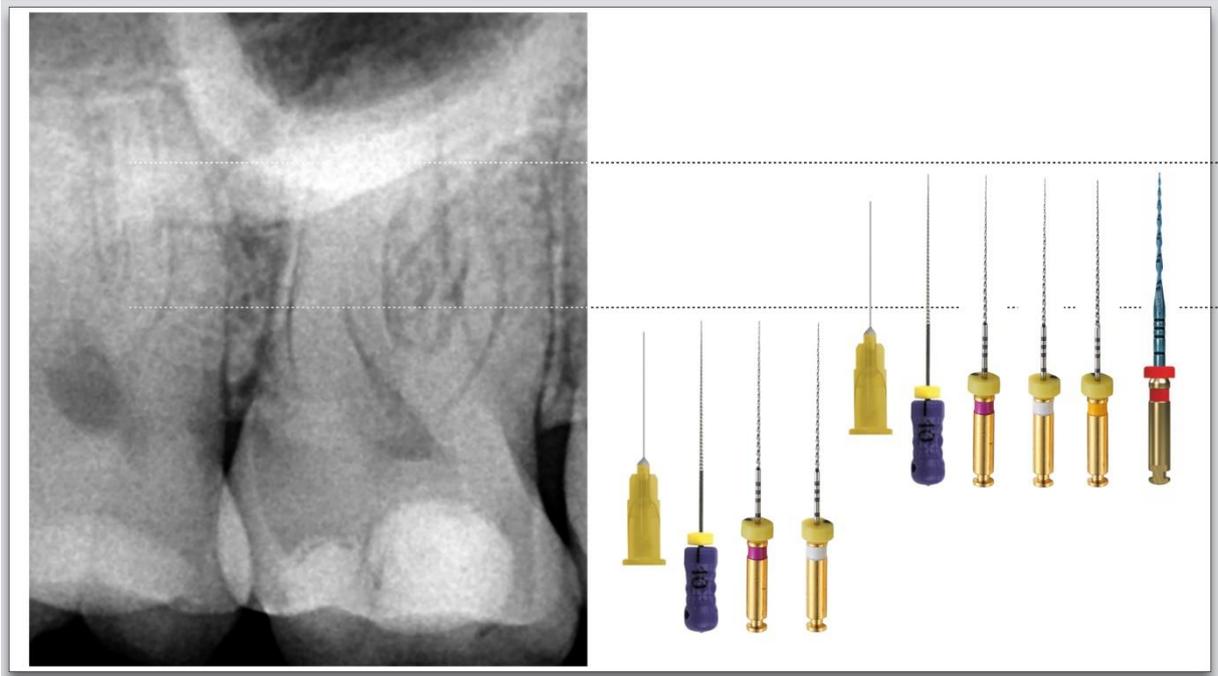


**Com REVERSO SILVER :**

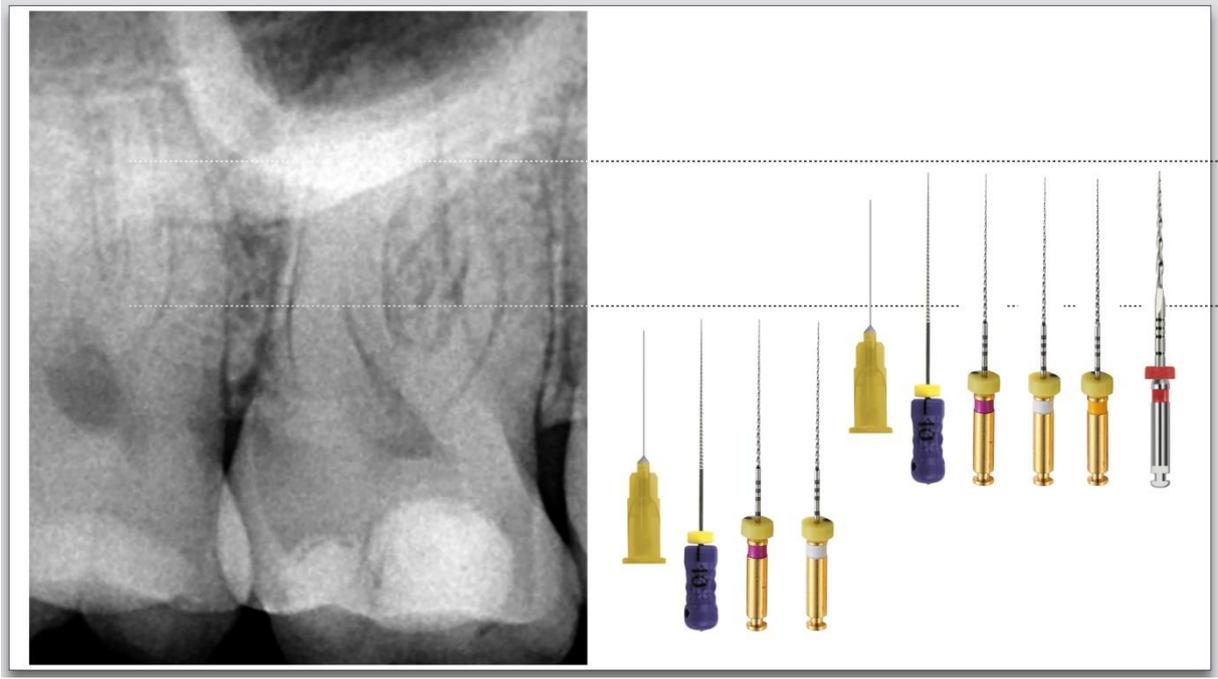

**Com GO-TAPER FLEX :**

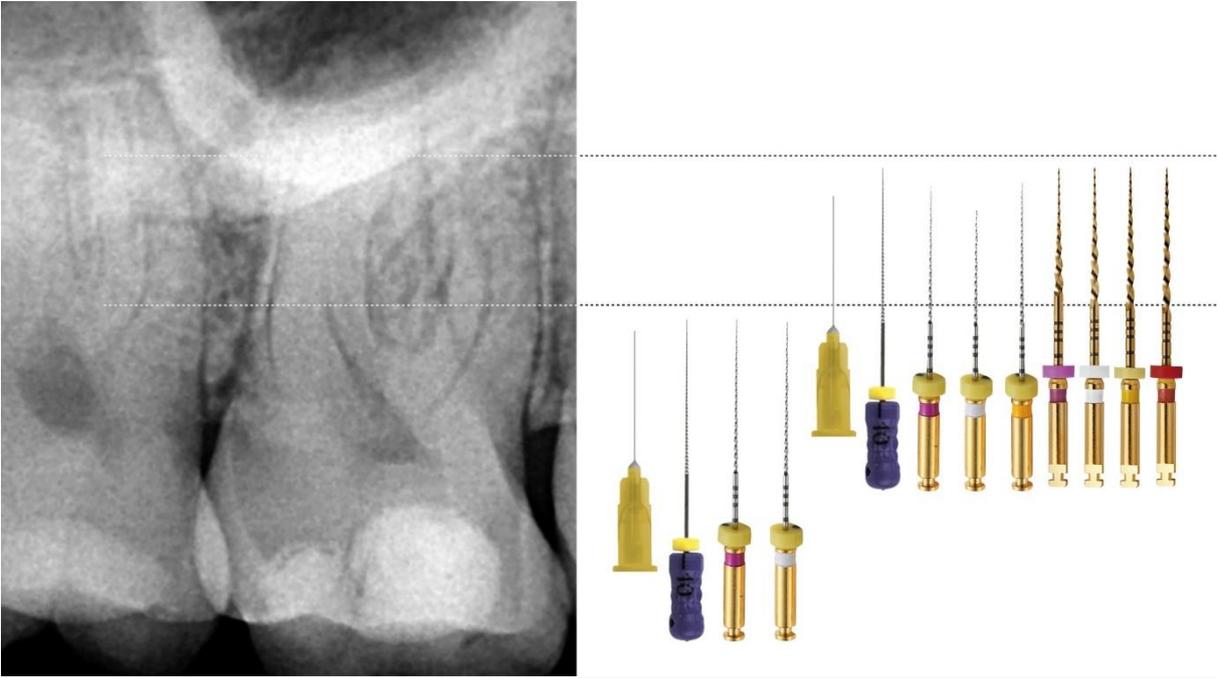

**Com GO-TAPER UNIVERSAL :**

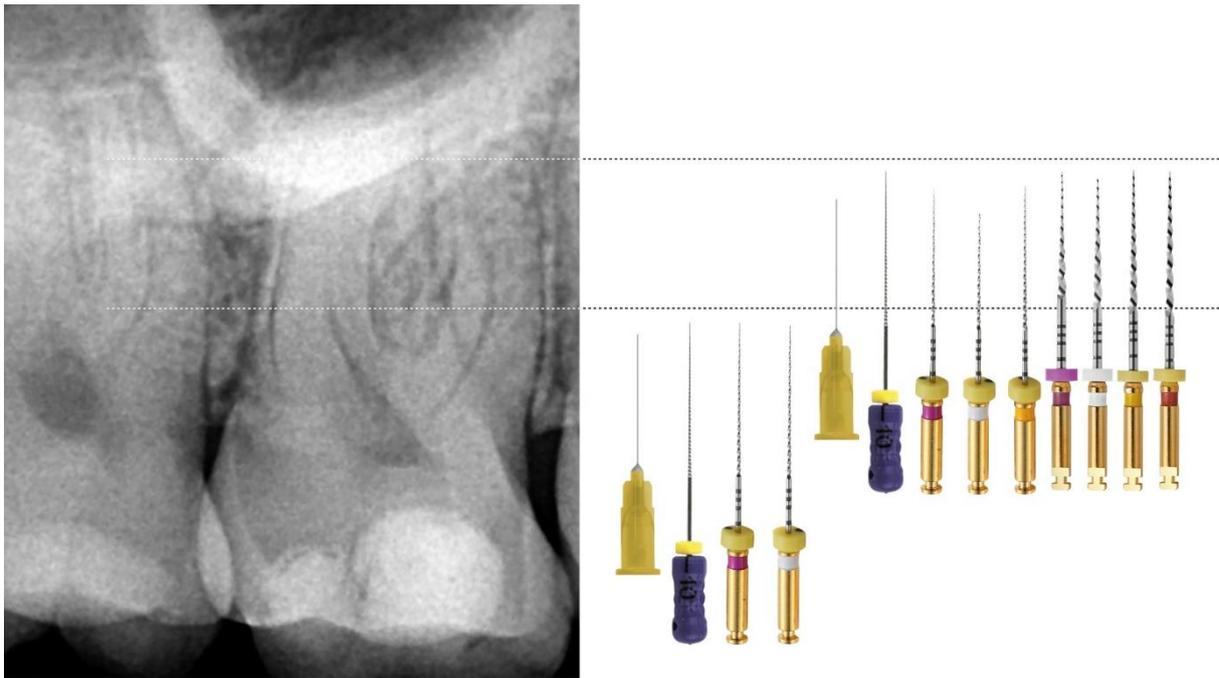

Após a abertura do dente, preencha toda a câmara pulpar com solução de hipoclorito de sódio. Insira nos canais uma lima n.º 10 até sentir resistência. Meça este comprimento e prepare o canal até ao referido comprimento utilizando **PREFILE**. Irrigue abundantemente com hipoclorito de sódio. Retome a lima n.º 10 e mova-a no canal até ao comprimento de trabalho. Meça o comprimento e prepare o canal até este comprimento utilizando **PREFILE**. Irrigue e finalize a preparação do canal radicular através de **EASY-FILE FLEX** ou **REVERSO BLUE** ou **REVERSO SILVER** ou **GO-TAPER FLEX** ou **GO-TAPER UNIVERSAL** no comprimento de trabalho.