

96%
de pareceres
favoráveis

CFPM

Descrição

Clinibite Fast CLINIX é um excelente material de registro de mordida do tipo silicone de adição e endurecimento rápido. O tempo de trabalho é de 30 segundos e o tempo de endurecimento é de um minuto após iniciar a mistura. A embalagem contém dois cartuchos de automistura de 50 ml e 12 pontas de mistura. Vinte e quatro consultores utilizaram o **Clinibite Fast CLINIX** em 341 aplicações clínicas.

Este produto recebeu uma **classificação clínica de 96%**.


Comentários dos Consultores

- "Material bastante duro, rígido e preciso."
- "Distribuição uniforme - sem complicação"
- "Os doentes apreciam o endurecimento rápido."
- "É necessário exercer enorme pressão para retirar o material do cartucho."


"TIVE MENOS AJUSTES COM OS REGISTOS DE MORDIDA CLINIBITE FAST CLINIX."



Em comparação com produtos concorrentes:

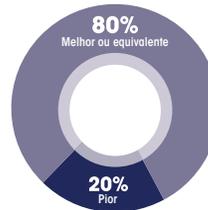

Percentagem de consultores que:

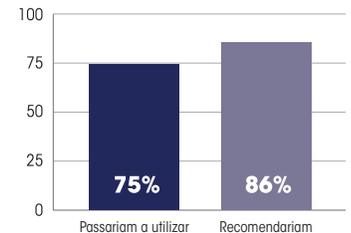

Características exclusivas

Clinibite Fast CLINIX obteve uma classificação entre muito bom e excelente quanto à facilidade de distribuição e aplicação, viscosidade, facilidade de remoção e detalhe da impressão. O material flui uniformemente nas superfícies dos dentes sem descair. O material endurecido do registro de mordida apresenta bons detalhes e pode ser recortado com brocas de pedra ou acrílicas; é bastante duro e frágil para ser recortado com uma lâmina de bisturi. Não ocorre nenhum resalto quando os moldes são articulados. Oitenta por cento dos consultores classificaram **Clinibite Fast CLINIX** com pontuação igual ou superior ao material de registro que utilizam atualmente. 75% dos consultores comprá-lo-iam, e 86% recomendá-lo-iam.